

Medi Spray

Alkoholowy gotowy do użycia preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego

- ◆ Szybki czas działania od 30 sek.
- ◆ Idealna powierzchnia bez smug
- ◆ Gotowy do użycia
- ◆ Zapach neutralny



Medi Spray przeznaczony jest do dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych takich jak: łóżka i fotele zabiegowe, aparatura medyczna i nieinwazyjny sprzęt operacyjny, sprzęt rehabilitacyjny oraz inne trudno dostępne powierzchnie sprzętu medycznego. Polecany szczególnie do szklanych i błyszczących powierzchni.



CE 2274

Cechy produktu:

- ◆ Przebadany zgodnie z nowymi normami dla środków dezynfekcyjnych (EN 14885).
- ◆ Wyjątkowe właściwości myjące bez cienia smug.
- ◆ Wysoka tolerancja materiałowa (nie zawiera aldehydów i fenoli).
- ◆ Nie zawiera substancji zapachowych.

Korzyści dla użytkownika:

- ◆ Gwarancja skuteczności i bezpieczeństwa stosowania.
- ◆ Wysoka redukcja ryzyka zakażenia.
- ◆ Szybki efekt czystej i zdezynfekowanej powierzchni.
- ◆ Możliwość zastosowania do wielu materiałów.
- ◆ Idealny dla personelu wrażliwego na zapachy.

Zastosowanie:

Medi Spray Medi Spray przeznaczony jest do dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych takich jak: łóżka i fotele zabiegowe, aparatura medyczna i nieinwazyjny sprzęt operacyjny, sprzęt rehabilitacyjny oraz inne trudno dostępne powierzchnie sprzętu medycznego. Polecany szczególnie do szklanych i błyszczących powierzchni. Preparat można stosować do wyrobów medycznych znajdujących się w bliskim kontakcie z żywnością. Polecany jest również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i wycisków silikonowych. Preparat nie zawiera aldehydu i fenolu. Odpowiednio dobrane składniki gwarantują szerokie spektrum bójcze w krótkim czasie i idealną czystość bez smug. Polecany szczególnie do szklanych i błyszczących powierzchni.

Spektrum	Normy wg EN 14885	Obciążenie organiczne	
		niskie	wysokie
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727	30 sek.	30 sek.
Grzyby (<i>C. albicans</i>)	EN 13624	15 sek.	15 sek.
Prątki gruźlicy (<i>M. terrae</i>)	EN 14348	30 sek.	60 sek.
Wirusy otoczkowe	EN 14476	30 sek.	60 sek.
Wirus Rota	EN 14476	30 sek.	60 sek.
Wirus Noro	EN 14476	30 sek.	30 sek.

Dokumentacja potwierdzająca skuteczność biobójczą preparatu dostępna u wytwórcy.

Sposób użycia:

Spryskać preparatem powierzchnię z odległości około 30 cm dbając o całkowite jej pokrycie, a następnie przetrzeć jednorazowym ręcznikiem. Powierzchnia nie wymaga spłukania wodą, wysycha szybko nie pozostawiając smug. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholu (np. szkło akrylowe). Wyrób przeznaczony do zastosowania przez profesjonalnego użytkownika.

Skład: etanol, propan-2-ol

Opakowanie: butelka 1 L ze spryskiwaczem, kanister 5 L

Środki ostrożności:

Informacje dotyczące sposobu postępowania z preparatem dostępne są w karcie charakterystyki produktu na stronie www.medisep.com.pl

Wyrób medyczny klasy II a w rozumieniu Ustawy o Wyrobach Medycznych.
Przeznaczony do dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych.

CE 2274

Data opracowania: 12.2016

