


Velox® Top AF

Alkoholowy gotowy do użycia preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych

- szerokie spektrum mikrobójcze już w 30 sekund
- wyjątkowe właściwości myjące
- gotowy do użycia

Preparat na bazie alkoholu przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych takich jak: łóżka i fotele zabiegowe, stoły operacyjne, wózki do przewożenia chorych, aparatura medyczna i operacyjna.

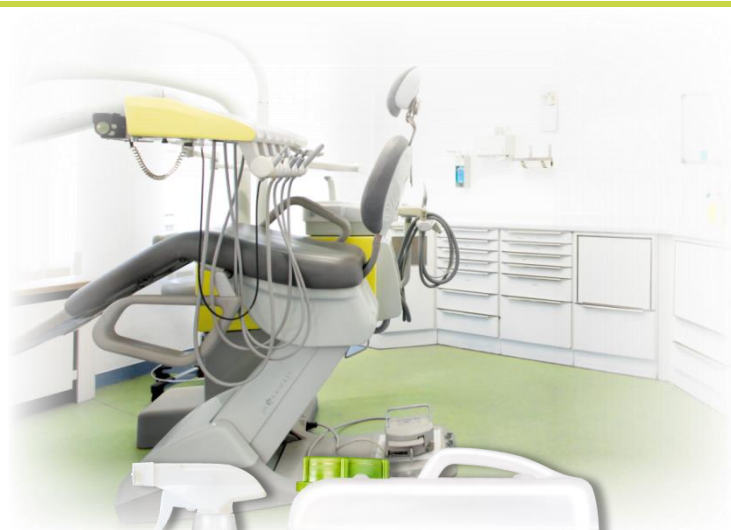

CE 2274

Cechy produktu:

- Przebadany zgodnie z nowymi normami dla środków dezynfekcyjnych (EN 14885).
- Szerokie spektrum mikrobójcze: bakterie, prątki, grzyby, wirusy.
- Wyjątkowe właściwości myjące.
- Wysoka tolerancja materiałowa (nie zawiera aldehydów i fenoli).
- Gotowy do użycia.

Korzyści dla użytkownika:

- Gwarancja skuteczności i bezpieczeństwa stosowania.
- Wysoka redukcja ryzyka zakażenia.
- Szybki efekt czystej i zdezynfekowanej powierzchni.
- Możliwość zastosowania do wielu wrażliwych materiałów.
- Daje efekt odświeżenia.
- Ekonomiczny w użyciu.

Zastosowanie:

Velox Top AF zalecany jest do szybkiej dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych takich jak: łóżka i fotele zabiegowe, stoły operacyjne, wózki do przewożenia chorych, aparatura medyczna i operacyjna. Polecany jest również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i wycisków silikonowych. Preparat nie zawiera aldehydu i fenolu dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Dzięki innowacyjnej formule opartej na synergii surfaktantów i technologii nanoceli produkt posiada szerokie spektrum bójcze i wyjątkowe właściwości myjące. Posiada pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed.

Spektrum	Normy wg EN 14885	Obciążenie organiczne	
		niskie	wysokie
Bakterie (w tym MRSA)	EN 1276	30 sek.	1 min.
	EN 13697	30 sek.	1 min.
	EN 13727	30 sek.	
Grzyby (C. albicans)	EN 1650	30 sek.	1 min.
	EN 13624	30 sek.	
Prątki gruźlicy (M. terrae)	EN 14348	30 sek.	1 min.
Wirus otoczkowe (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola, wirus grypy A, B, C, Herpes simplex)	DVV/RKI	30 sek.	30 sek.
Wirus Rota	EN 14476	30 sek.	
Wirus Adeno	EN 14476	1 min	

Dokumentacja potwierdzająca skuteczność biobójczą preparatu dostępna u wytwórcy.

Sposób użycia:

Spryskać preparatem powierzchnię z odległości około 30 cm dbając o całkowite jej pokrycie, a następnie przetrzeć jednorazowym ręcznikiem. Powierzchnia nie wymaga splukania wodą, wysycha szybko nie pozostawiając smug. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholu (np. szkło akrylowe). Wyrób przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego.

Skład: 100 g zawiera:

40g - propan-2-ol (CAS:67-63-0)

20g - etanol

0,39g - aminy, n-C10-16-alkiltrimetylenodi-, produkty reakcji z kwasem chlorooctowym

0,25g - chlorek didecyldimetyloamoniowy

Opakowanie: butelka 1 L ze spryskiwaczem, kanister 5 L

Środki ostrożności:

Informacje dotyczące sposobu postępowania z preparatem dostępne są w karcie charakterystyki produktu na stronie www.medisep.com.pl

Wyrób medyczny klasy II a w rozumieniu Ustawy o Wyrobach Medycznych.
Przeznaczony do dezynfekcji wyrobów medycznych.

CE 2274



Data opracowania: 05.2017

Producent:

Medi-Sept Sp. z o.o., Konopnica 159 c
21-030 Motycz, Polska, tel.: +48 81 535 22 22
info@medi-sept.com.pl, www.medisep.com.pl



Profesjonalne systemy
utrzymania higieny